

## ＜布製マスクの利用・洗濯方法＞

(今回、配布する布製マスクのメーカーからの情報をまとめたもの)

### 【布製マスクの洗い方】

1. 衣料用洗剤で、もみ洗いではなく、軽く押し洗いしてください。
2. 十分なすすぎをしてください。
3. 乾燥機は使わず、陰干しで自然乾燥してください。

### 【洗濯回数】

1. 洗濯により縮みますが、複数回の再利用については品質上問題ないことを確認しております。
2. 一日一回の洗濯の頻度を推奨しており、汚れがつかましたら、その都度洗濯してください。

### 【漂白剤、柔軟剤の使用について】

1. 汚れが気になる場合は、塩素系漂白剤を使い、においがなくなるまで十分なすすぎをしてください。
2. 柔軟剤の使用は避けてください。

### 【洗濯表示記号】



### 【ご注意】

1. 漂白剤を使用する場合は、炊事用のゴム手袋などをご利用ください。

### 【差出人】

厚生労働省子ども家庭局母子保健課

### 【問合せ先】

妊婦向け布製マスクの配布に関する電話相談窓口  
03-5253-1111 (4988) (10時~17時)

(市区町村の問い合わせ先)

### 【問合せ先】

遠賀町役場 健康こども課 健康対策係  
093-293-1234